

SCHEMA TECNICA
Ref. 05438 – Termometro Ecologico



IMMAGINE PRODOTTO

Il Termometro ecologico Farmamed, (senza mercurio), è utile per la misurazione esterna della temperatura corporea, adotta una lega di gallio, indio e stagno atossica ed ecologica. Il termometro ecologico Farmaed è in grado di rilevare la temperatura corporea da 35°C a 42°C.

1. Il liquido contenuto nella colonna deve scendere al di sotto della scala graduata prima dell'uso, poi pulire e sterilizzare il termometro clinico con disinfettanti medicali.
2. In caso di misurazioni per via orale posizionare il termometro sotto la lingua in una posizione stabile e ben a contatto con la mucosa e indicare al paziente di chiudere saldamente la bocca.
3. In caso di misurazione rettali si raccomanda di applicare un agente lubrificante al termometro prima del suo inserimento.
4. In caso di misurazione ascellari occorre posizionare il termometro al centro dell'ascella e tenere il braccio appoggiato al torace in modo che l'ascella resti chiusa.

Si prega di leggere la misura dopo circa 5 minuti. Si raccomanda di seguire la procedura scritta sopra.

Si raccomanda di agitare lo SHAKER al primo utilizzo e prima di ogni misurazione, soprattutto se il termometro non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo.



CODICE EAN: 8023766053075

CARATTERISTICHE PRODOTTO: Termometro ecologico 35°C – 42°C

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 Termo ecologico
- 1 Astuccio protettivo
- 1 Manuale utente

CLASSIFICAZIONE

Dispositivo Medico di Classe Is conforme alla Dir. 93/42/CE e ss.mm.ii. e recepimenti.

AVVERTENZE

- Non è consigliabile effettuare misurazioni per via orale su bambini di età inferiore ai 10 anni
- Avvertire il paziente di non masticare, parlare o muoversi quando il termometro clinico è posizionato sotto la lingua.
- In caso di misurazioni rettali inserire il termometro per circa 2 cm
- Si raccomanda di non mangiare, fumare o fare il bagno fino a 30 minuti prima della misurazione
- Il dispositivo non è adatto ad applicazioni specifiche: (ad esempio termometri per bambini prematuri, termometri per le misurazioni di temperature basale).
- Verificare il corretto funzionamento del termometro una volta all'anno.

SMALTIMENTO DEL TERMOMETRO CLINICO

Il liquido metallico è una lega composta da gallio, indio e stagno. Questo termometro clinico deve essere maneggiato con cura. In particolare si deve prestare attenzione a non far cadere lo strumento o trattarlo in alcun modo che potrebbe provocare danni.

Quando i termometri clinici sono rotti, pulire il liquido metallico con un panno inumidito da acqua e sapone.